

CleanWave®

Desophan RG 4000

Anwendungssegment: Desinfektion und Personalhygiene
Produktgruppe: Desinfektion



Produkt-Charakteristik

- Wirkungsvolles Produkt für die Desinfektion und Reinigung aller harten Oberflächen
- Für Krankenhäuser, Praxen, Ambulanzen, Alten- und Pflegeheime, Schulen und Schwimmbäder bestens geeignet
- Wirkungsspektrum: bakterizid, fungizid
- VAH gelistet

Anwendung

Dosierung: Mit einem geeignetem Dosiersystem abmessen und mit Wasser eine Lösung herstellen. Flächen und Gegenstände feucht wischen und einwirken lassen.
Konzentration und Einwirkzeiten: 5 %-ig 15 Minuten, 2 %-ig 1 Stunde, 1 %-ig 4 Stunden.
Danach mit Wasser nachwischen.

Besondere Hinweise

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Gefahrstoff. Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie auf unserer Website www.remsgold.de. Verkauf nur an gewerbliche Verbraucher.

Für eine sichere Desinfektion sind die Konzentrations- und Einwirkzeiten genau einzuhalten.

Artikel

Artikelnummer	Inhalt	VPE	Gebinde	EAN-Code
1501710	10 kg	1	Kanister	4015388157105

Stand: 07. September 2017