

REGOsept

Flächendesinfektion DS 4004



Anwendungssegment: Desinfektion
Produktgruppe: Flächendesinfektion

Produkt-Charakteristik

- Flüssiges Konzentrat zur Flächendesinfektion und Reinigung
- Alkohol- und Parfümfrei

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten:

Bakterizid, levurozid: 7,5 % (75 g/L) – 5 min, 2,5 % (25 g/L) – 15 min, 1 % (10 g/L) – 60 min
Begrenzt viruzid: 2,5 % (25g/L) – 5 min, 1 % (10 g/L) - 60 min
Papova-/Polyomaviren: 7,5 % (75 g/L) – 2 min, 2 % (20 g/L) – 30 min
Rotaviren: 0,5 % (5 g/L) – 30 s

Lebensmittelherstellung:

DIN EN 1276 und DIN EN 13697 Bakterizidie:

Belastung hoch: 0,5 % - 5 Minuten; Belastung niedrig: 0,25 % - 5 Minute

DIN EN 1650 Levurozidie:

Belastung hoch/niedrig: 0,25 % - 15 Minuten

DIN EN 13697 Levurozidie:

Belastung hoch/niedrig: 0,5 % - 15 Minuten

Einsatz in Vliestuchspendersystemen: REGOsept eignet sich insbesondere zur Verwendung in Vliestuchspendersystemen.

Listung



Anwendung

Die zu desinfizierende Fläche mit einer ausreichenden Menge der frisch angesetzten Gebrauchslösung vollständig benetzen, diese mechanisch verteilen und abtrocknen lassen (Scheuer-Wisch-Desinfektion). Nach Ablauf der Einwirkzeit Lösung restlos von der Oberfläche entfernen. In der Routineanwendung können die desinfizierten Flächen unmittelbar nach der Abtrocknung wieder genutzt werden.

Besondere Hinweise

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Gefahrstoff. Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie auf unserer Website www.remsgold.de. Verkauf nur an gewerbliche Verbraucher.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Für eine sichere Desinfektion sind die Konzentrations- und Einwirkzeiten genau einzuhalten.

Artikel

Artikelnummer	Inhalt	VPE	Gebinde	EAN-Code
1501211	1 l	6	Flasche	4015388157211
1501212	10 l	1	Kanister	4015388157204

Stand: 04. Februar 2020

REMSGOLD Chemie GmbH & Co. KG - Talstraße 2 - D-73650 Winterbach - Tel. 07181 97704-0 - info@remsgold.de - www.remsgold.de

Diese Angaben sollen nach unseren besten Kenntnissen und Erfahrungen unverbindlich beraten. Sie befreien den Verwender nicht davon, die Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke selbst zu prüfen. Anwendung und Lagerung liegen außerhalb unseres Einflussbereiches und fallen daher ausschließlich in den Verantwortungsbereich des Verwenders. Wir schließen daher jede Haftung für eventuelle Schäden aus Anwendung und Lagerung aus.