



Descosept Pur

alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel

VAH- und DVG-gelistet,

Produkt- charakteristik:

- VAH- und DVG-gelistet
- rückstandsfrei, Belagsbildung nach Anwendung ausgeschlossen
- schnell wirksam
- besonders geeignet für Allergiker, da parfümfrei
- aldehydfreie Schnelldesinfektion auf der Basis von Ethanol
- zur wirksamen und schnellen Desinfektion von medizinischem Inventar, Medizinprodukten sowie Flächen aller Art
- besonders für unzugängliche Flächen geeignet
- besonders für die Schnelldesinfektion in der Lebensmittelindustrie und im Küchenbereich geeignet
- parfüm- und aldehydfrei, daher für hautempfindliche Personen geeignet

Anwendung:

Flächen und Gegenstände mit Descosept Pur aus mindestens 30 cm Abstand bis zur vollen Benetzung besprühen, nach Ablauf der Einwirkzeit ggf. mit Einmaltuch nachwischen. Zur Vermeidung von starke Raumluftbelastung durch Alkohol Descosept Pur in ein Einmaltuch sprühen und die Flächen bei entsprechender Benetzung abwischen. Flächen anschließend vollständig abtrocknen lassen. Die Anwendung von Descosept Pur hat keine Belagsbildung zur Folge. Nicht anwenden bei alkoholempfindlichen Oberflächen (Acrylglas)!

Dosierung / Einwirkzeit:

bakterizid inkl. MRSA, levurozid gem. VAH/ÖGHMP-Richtlinien / EN 13697 1 Min.*

(*gelistet in der 5-Min.-Spalte der VAH-Liste)

Tuberkulose-Bakterien (M. terrae) gem. EN 14348 30 Sek.

wirksam gegen alle behüllten Viren

inkl. HBV / HIV / Vaccinia- / HCV / BVDV / Influenza-/Grippe-Viren (begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung) 30 Sek.

Noro-Viren (MNV, Murines Noro-Virus) gem. EN 14476

1 Min.

	Einwirkzeiten gem. DVG:	siehe DVG-Liste
Besondere Hinweise:	Ausbringung max. 50 ml/m ² . Die Gesamtmenge pro Raum darf nicht mehr als 100 ml/m ² Raumgrundfläche betragen.	
Inhaltsstoffe:	In 100 g sind enthalten als wirksamer Bestandteil: 45 g Ethanol Parfümfrei, keine auf der Fläche verbleibenden Inhaltsstoffe.	
Sicherheitshinweise:	Gefahrensymbol: Entzündlich. Bitte beachten Sie die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf dem Etikett. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.	
Gebindegrößen:	10 x 1 L (Flasche) Art.-Nr. 4340001	

Diese Angaben sollen nach unseren besten Kenntnissen und Erfahrungen unverbindlich beraten. Sie befreien den Verwender nicht davon, die Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke selbst zu prüfen. Anwendung und Lagerung liegen außerhalb unseres Einflussbereiches und fallen daher ausschließlich in den Verantwortungsbereich des Verwenders. Wir schließen daher jede Haftung für eventuelle Schäden aus Anwendung und Lagerung aus.

Remsgold Chemie GmbH & Co. KG
DIE REINE SAUBERKEIT

Talstraße 2
D-73650 Winterbach
Telefon: 07181 / 9 77 04-0
Telefax: 07181 / 9 77 04 50



Ihr Remsgold –Partner:

Erstelldatum: 28.06.2012
Descosept Pur Pl.odt

ISO 9001/AA04003.DOC/01.03.2006